

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Impregum™ Super Quick
Polyeter avtrykksmateriale

**Gjenskape hver
detalj i løpet av
2 minutter?
Ja, det er mulig.**



“Polyeterpresisjon” på den raskeste måten til mindre oppgaver

Impregum Polyeter avtrykksmateriale har alltid vært et pålitelig valg for vanskelige oppgaver og implantater. Men ville det ikke være flott om man nå enda enklere kunne oppnå den samme presisjonen og detaljnøyaktigheten også til enkelttannsrestaureringer?

Til dette har vi utviklet Impregum Super Quick Polyeter avtrykksmateriale.

Her kombineres polyetermaterialets presisjon og pålitelighet med a-silikonets korte herdetid. Dype lommer og fuktighet vil ikke forsinke prosessen.

Raskere herdetid.

Med bare 45 sekunders arbeidstid og 2 minutters herdetid gir det nye Super Quick-materialet raskere avtrykk av mindre kompliserte kasus som enkeltstående kroner, implantater, innlegg/onlays og mindre broer opp til 3 ledd.


100% polyeter. Pålitelig presisjon.

På lik linje med andre polyetermaterialer, har Impregum Super Quick en svært god fuktighetstoleranse og en konsistent flyteevne. Disse to egenskapene gir nøyaktige avtrykk og en suveren detaljgengivelse for restaureringer som krever høy presisjon.

Du kan bruke hele den oppgitte arbeidstiden. Siden det er et polyetermateriale er arbeidstiden 45 sekunder for Impregum Super Quick. Når arbeidstiden er over, starter herdingen. Slik kan du unngå unøyaktigheter som kan inntreffe med a-silikon på grunn av for tidlig herding.

Komfortabelt for pasienten.

En forbedret frisk mints smak og kortere herdetid i munnen bedrer pasientens opplevelse av avtrykkstakingen.

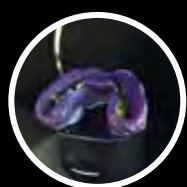

Polyeter møter

CAD/CAM workflow.

Impregum Super Quick Polyeter avtrykksmateriale kan skannes med dagens generasjon av skannere og gir et effektivt samarbeid med ditt tanntekniske laboratorium.


3M™ Impregum™ Super Quick.



3M™ Astringent Retraction Paste for en rask og vevsvennlig gingival retraksjon som også gir bedre blødningskontroll.



Enkel applisering med høy presisjon. 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body Polyeter avtrykksmateriale appliseres med en 3M™ Intra-oral lilla sprøyte.

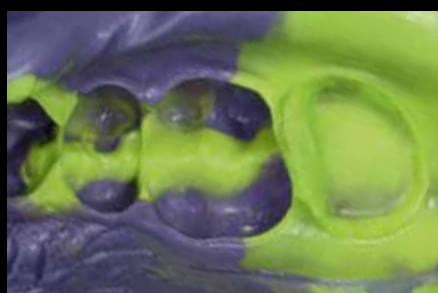

Nøyaktig, blærefri detaljgjøvelse og sterke kontrastfarger for bedre lesbarhet.

1-trinns presisjonsavtrykk tatt med 3M™ Impregum™ Super Quick Polyeter avtrykksmateriale (Medium og Light body) og 3M™ Impression Tray engangsskje.

SVÆRT FORNØYD

En klinisk undersøkelse viser **en svært høy andel fornøyde brukere**. Nesten 95 % er fornøyde med 3M™ Impregum™ Super Quick når det gjelder presisjonsavtrykk og **tilpasning av ferdig restaurering**.






Kilde: Undersøkelse utført av 3M med 447 deltakere fra Europa og USA, 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- Det første super-raske polyeter-materialet med 45 sek. arbeidstid og 2 min. herdetid
- Tilgjengelig i medium og light body viskositet
- For monofase og 1-trinns avtrykksteknikker
- Perfekt til avtrykk av enkeltstående kroner, implantater, innlegg/onlays og mindre broer opp til 3 ledd.



	Dispensering	Avtrykksteknikk	Enkeltstående krone	Liten implantat (≤ 2 ledd)	Innlegg/onlays (≤ 2 ledd)	Liten bro (≤ 3 ledd)	Anbefalt max. arbeidstid (min:sek)	Intraoral herdetid ved 37°C (min:sek)
 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofase eller 1-trinn	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-trinn	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Bestillingsinformasjon



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Introsett (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body Introsett (69381)

Varenr

Produktinformasjon

NY

69383

Introsett for 3M™ Pentamix™ 3 blandemaskin

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body
1 base MB á 300 ml, 1 katalysator MB á 60 ml, 1 3M™ Penta™ materialbeholder MB, 10 3M™ Penta™ røde blandespisser, 1 3M™ Penta™ elastomersprøyte, 1 flaske Polyeter Adhesive á 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapsler

NY

69381

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body

1 base MB á 300 ml, 1 katalysator MB á 60 ml, 2 ampuller LB á 50 ml, 1 3M™ Penta™ materialbeholder MB, 10 3M™ Penta™ røde blandespisser, 5 3M™ lilla intraorale sprøyter, 5 3M™ Garant™ lilla blandespisser, 5 3M™ Garant™ hvite appliseringsspisser, 1 flaske Polyeter Adhesive á 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapsler, 6 3M™ avtrykksskjeer

NY

69405

Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body

6 base á 300 ml, 6 katalysatorer á 60 ml, 1 brukerveiledning

NY

69385

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill

2 base á 300 ml, 2 katalysatorer á 60 ml

NY

69379

3M™ Impregum™ Super Quick Light Body

4 3M™ Garant™ ampuller á 50 ml, 5 3M™ lilla intraorale sprøyter, 5 3M™ Garant™ lilla blandespisser

Blandemaskiner og tilbehør

77871

3M™ Pentamix™ 3 blandemaskin

77903

3M™ Pentamix™ Lite blandemaskin – 230 V 50 Hz INT
inkl. 3M™ Penta™ materialbeholder

NY

69387

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium materialbeholder

77944

3M™ Penta™ materialbeholder for 3M™ Pentamix™ Lite blandemaskin

71507

3M™ lilla intraorale sprøyter, 20 stk.

71508

3M™ lilla intraorale sprøyter, 50 stk.

77580

1 avtrykkspistol 1:1/2:1

77601

Veggbeslag til 3M™ Pentamix™ 3 blandemaskin

30600

1 flaske Polyeter Adhesive á 17 ml

77949

3M™ Penta™ røde blandespisser, 50 stk.

NY

71454

3M™ Garant™ lilla blandespisser, 50 stk.

71461N

3M™ Garant™ hvite appliseringsspisser, 50 stk.

3M

3M Norge A/S
3M Oral Care
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tel: 0 63 84
www.3M.no/dental

3M.no/ImpregumSuperQuick

3M, "3M Science. Applied to Life" og Impregum er varemerker fra 3M eller 3M © 3M 2018. All rights reserved. BR61-NO58-1.0/2018-04 / PB611266-1NO180315